

INSTRUCCIONES DE USO

PULSERA DETECTORA DE SUMISIÓN QUÍMICA

Herramienta preventiva que permite detectar de forma rápida la posible presencia de sustancias utilizadas habitualmente en casos de sumisión química mediante un cambio de color.

No sustituye la asistencia sanitaria ni las pruebas toxicológicas ni la actuación policial.



1 ¿QUÉ DETECTA LA PULSERA?

SENSOR 1

GHB
(Éxtasis líquido)



SENSOR 2

Ketamina
Escopolamina
(burundanga)
MDMA
Otras sustancias
aminadas utilizadas
habitualmente en la
sumisión química



2 ¿CÓMO UTILIZAR LA PULSERA?

1

Deposita una pequeña gota de la bebida sobre cada uno de los sensores.



2

Espera aprox.
3 segundos.



3

Observa si alguno de los sensores cambia de color.



Tiempo de reacción: aprox. 3 segundos.

3 ¿CÓMO INTERPRETAR EL RESULTADO?

SI NO SE PRODUCE NINGÚN CAMBIO DE COLOR

SENSOR 1

GHB



SENSOR 2

AMINAS



No se detecta la presencia de las sustancias para las que ha sido diseñada la pulsera.

SI ALGUNO DE LOS SENSORES CAMBIA DE COLOR

SENSOR 1

GHB



SENSOR 2

AMINAS



Puede indicar la posible presencia de alguna de las sustancias detectadas por la pulsera.



EN ESE CASO:



Llama inmediatamente al
112 Emergencias.



Conserva la bebida
si es posible.



No retires la pulsera.

4 ¿QUÉ HACER SI EL REACTIVO DA POSITIVO?



LLAMA
INMEDIATAMENTE AL

112
EMERGENCIAS



SI SE
ENCUENTRA MAL

- No le des comida ni bebida.
- Mantén su intimidad y evita que terceras personas hagan fotografías o graben videos.



ESCUCHA Y
ACOMPAÑA

- No la cuestiones ni hagas juicios de valor.
- No realices interrogatorios para comprobar lo sucedido.
- Escúchala con respeto y tranquilidad.



PRESERVA LAS
POSIBLES PRUEBAS

- Conserva la bebida y el recipiente donde haya bebido, manipulándolos lo menos posible.
- No limpies ni vacíes el recipiente.
- Mantén colocada la pulsera detectora. No te la quites.
- Deja todo tal y como se encuentre hasta la llegada de los servicios de emergencia.

5 ¿CUÁNTO DURA?



La pulsera está diseñada para utilizarse durante toda la jornada o evento.

Mientras los sensores no hayan reaccionado positivamente, puede utilizarse para comprobar distintas bebidas o volver a comprobar una misma bebida.

6 INFORMACIÓN IMPORTANTE



- Utiliza la pulsera antes de consumir la bebida.
- La pulsera es una herramienta de prevención y apoyo a la detección temprana.
- No sustituye la asistencia sanitaria, las pruebas toxicológicas ni la actuación de los servicios de emergencia.
- Si tienes dudas o presentas síntomas compatibles con una posible sumisión química, solicita ayuda inmediatamente, aunque la pulsera no haya cambiado de color.



Este dispositivo no constituye una intervención sanitaria.